


# PneumoDart®



REF TM-317 Za enkratno uporabo

14 ga x 3.25 in. NSN 6515-01-655-9514

TyTek Medical Inc.  
8904 Beckett Rd, West Chester, OH 45069  
www.tytekmedical.com

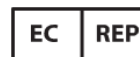

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Tel: (+31) 70 345 8570  
Fax: (+31) 70 346 7299

STERILE R

CE  
1639

## Navodila za uporabo

- Izberite mesto za namestitev igle tako, da identificirate drugi medrebrni prostor na sprednji strani prsnega koša na srednji klavikularni liniji na isti strani telesa kot je poškodba. (FIG 1).
- Za čiščenje mesta vboda igle uporabite antiseptično raztopino.
- Preverite, ali je varnostni pečat nepoškodovan. Če ni nedotaknjen, izdelka ne uporabljajte. Čvrsto primite PneumoDart®, zasukajte šeststrobi pokrovček, da zlomite tesnilo, in odstranite pokrovček.
- Odstranite iglo PneumoDart® iz ohišja.
- Vstavite sklop igle v bolnikovo kožo nad zgornjo mejo tretjega rebra na srednji klavikularni liniji. Iglo usmerite v medrebrni prostor pod kotom 90° glede na steno prsnega koša, pri tem pa pazite, da vstop ni medialno glede na linijo bradavic in ni usmerjen proti srcu.
- Z vzmetjo obremenjena zložljiva atravmatska konica (FIG 3) se umakne, ko iglo potisnete skozi steno prsnega koša in samodejno napreduje, ko se predre pleuralna membrana, če je prisoten pnevmotoraks.
- Vizualni indikator položaja igle (FIG 4). Ko PneumoDart® prodre v pleuralno votlino, bo zeleni indikator kliknil v spodnjem položaju in slišali boste nenadno uhajanje zraka, ko bo tenzijski pnevmotoraks dekompresiran.
- Zavarujte na način, ki ga usmerjajo smernice.
- Pazljivo spremljajte bolnika glede ponovitve tenzijskega pnevmotoraksa ali dihalne stiske.

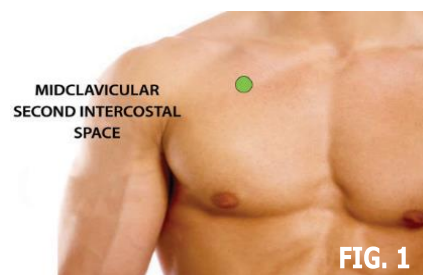


FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

### Opozorilo o izolaciji snovi v telesu

Vedno uporabljajte ustrezne postopke za izolacijo telesnih snovi in osebno zaščitno opremo, da preprečite stik s kontaminiranimi tekočinami.

### Previdnost

PneumoDart® sme uporabljati samo osebje, ki je bilo ustrezno usposobljeno o postopkih za lajšanje tenzijskega pnevmotoraksa s to napravo. Nepravilna uporaba PneumoDart® lahko povzroči poškodbe. Uporabite PneumoDart® po navodilih po navodilih strokovnega sveta NMP. Ne nameščajte PneumoDart med aktivnim stiskanjem prsnega koša.

Potencialne nevarnosti dekompresije z iglo vključujejo srčno tamponado, življenjsko nevarno krvavitev zaradi poškodbe pljučne arterije, aorte ali medrebrne žile, neterapevtsko vstavev in morebitno poškodbo živca na mestu vstavitve. Nevarnostim se je mogoče izogniti z upoštevanjem odobrenih protokolov, usposabljanjem in ustrezno postavitvijo mesta. Neupoštevanje lahko povzroči dekompenzacijo bolnika, poškodbo in/ali smrt.

## Odstranjevanje

PneumoDart® je samo za enkratno uporabo. V nobenem primeru ni za ponovno uporabo. Uporabite ga lahko enkrat, nato pa ga morate ustrezno zavreči. PneumoDart® zavrzite na način, ki zagotavlja izolacijo telesne snovi od potencialno nalezljivih snovi in preprečuje poškodbe z ostrimi predmeti.

## Shranjevanje

PneumoDart® shranjujte na suhem pri temperaturah med -12° C in 140° C.

## Omejena garancija

Izdelki in komponente v tem paketu so medicinske naprave, namenjene izključno za uporabo s strani ustrezno usposobljenih zdravstvenih delavcev. TyTek Medical Inc. jamči, da so izdelki in komponente brez napak v materialu in izdelavi ter da so primerni izključno za uporabo kot medicinske naprave za posebne namene, opisane v priročniku, s strani usposobljenih zdravstvenih delavcev za obdobje 12 mesecev od datuma pošiljanja s strani TyTek Medical Inc. Vsaka uporaba izdelkov ali komponent, ki presega specifično uporabo, opisano v tem priročniku, ali s strani osebe, ki ni usposobljena ali zakonsko pooblaščen za uporabo izdelkov ali komponent, razveljavi to omejeno garancijo. RAZEN KOT JE NAVEDENO TUKAJ, TYTEK MEDICAL INC. NE DAJE NOBENIH DRUGIH JAMSTEV, IZREČNIH ALI NAZNAČENIH, GLEDE IZDELKOV ALI KOMPONENT IN IZREČNO ZAVRAČA NAZNAČENIH JAMSTEV ZA PRODAJO IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN.

